

# Λίστα ελέγχου για την εγκατάσταση των οικογενειών προϊόντων A-dec 300, 400 και 500

Για αναλυτικότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους οδηγούς εγκατάστασης για την οδοντιατρική έδρα και τις προαιρετικές μονάδες.

Μοντέλο	A/A	Μοντέλο	A/A
Έδρα:		Προβολέας:	
Παροχή:		Εξοπλισμός βοηθού:	
Κέντρο υποστήριξης:		Άλλο:	

## Οδοντιατρική έδρα

- Η οδοντιατρική έδρα είναι καλά στερεωμένη στο δάπεδο
- Η έδρα λειτουργεί σωστά, συμπεριλαμβανομένων της ανύψωσης και της ανάκλισής της, καθώς και οι προγραμματιζόμενες λειτουργίες που ελέγχονται από τα πληκτρολόγια αφής και τον ποδοδιακόπτη
- Το στήριγμα κεφαλής λειτουργεί σωστά

## Σύστημα παροχής

- Τα εργαλεία χειρός λειτουργούν σωστά και έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις του ιατρού:
  - Νερό ψύξης, ψυκτικό και σπρέι
  - Έκπλυση σωλήνωσης εργαλείων χειρός
  - Βαλβίδες και διακόπτες βάσεων εργαλείων χειρός
  - Πίεση αέρα οδήγησης εργαλείων χειρός
- Αν περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό: Ο ελατηριωτός βραχίονας flexarm εξισορροπείται σωστά
- Το αερόφρενο του βραχίονα flexarm λειτουργεί σωστά
- Μόνο για το 336: Ο πείρος αναστολής περιστροφής είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά
- Μόνο για το 336: Έχουν ρυθμιστεί το ύψος του βραχίονα χειροκίνητης ρύθμισης ύψους και η τάση περιστροφής
- Η κεφαλή ελέγχου βρίσκεται σε ευθύγραμμη θέση, βάσει μέτρησης στον δίσκο
- Οι αρθρωτοί βραχίονες δεν μετατοπίζονται
- Ο ποδοδιακόπτης λειτουργεί σωστά

## Οδοντιατρικός προβολέας

- Όλες οι ρυθμίσεις και τα χειριστήρια του προβολέα λειτουργούν σωστά
- Η τάση του βραχίονα flexarm του οδοντιατρικού προβολέα και της κεφαλής είναι ρυθμισμένη σωστά
- Μόνο για οδοντιατρικό προβολέα αλογόνου: Υπάρχει εφεδρικός λαμπτήρας (A-dec p/n 041.709.00)

## Εξοπλισμός βοηθού, πτυελοδοχείο και πλήρωση ποτηριού

- Η αναρρόφηση έχει ρυθμιστεί σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:
  - Υγρή αναρρόφηση** -  $34 \pm 7$  kPa ( $10 \pm 2$  ίντσες Hg), 255 sl/min (9 SCFM) κατ' ελάχιστο
  - Ξηρή/ημίξηρη αναρρόφηση** -  $16 \pm 3,5$  kPa ( $4,5 \pm 1$  ίντσα Hg), 340 sl/min (12 SCFM) κατ' ελάχιστο
- Τα κουμπιά της σύριγγας αέρα και νερού λειτουργούν σωστά
- Οι βαλβίδες στη διάταξη εκκένωσης μεγάλου όγκου (HVE) και τη σιελαντλία κινούνται ελεύθερα
- Ο χρόνος πλήρωσης ποτηριού έχει ρυθμιστεί σωστά
- Η ροή του πτυελοδοχείου εκπλένει αποτελεσματικά τη λεκάνη, η λεκάνη αποστραγγίζεται σωστά
- Μόνο για τα 361, 362 και 363: Το άκρο του σωλήνα αερισμού του πτυελοδοχείου είναι 13 χιλ. (1/2 ίντσα) πάνω από το κεντρικό πλαίσιο στήριξης
- Μόνο για τα 361 και 363: Μεταξύ της λεκάνης του πτυελοδοχείου και του μπράτσου υπάρχει απόσταση 29 χιλ. (1-1/8 ίντσες)

## Παροχές αέρα/νερού

- Η ρυθμιζόμενη πίεση αέρα είναι 552 kPa (80 psi)
- Το κουτί δαπέδου δεν εμφανίζει διαρροή αέρα και νερού
- Η αποστράγγιση μέσω βαρύτητας λειτουργεί σωστά
- Η σωλήνωση και οι συνδέσεις δεν είναι λυγισμένες και δεν εμφανίζουν διαρροές αέρα και νερού
- Η σωλήνωση και τα καλώδια που περισσεύουν είναι τυλιγμένα και φυλάσσονται σε απόσταση από τα κινητά μέρη

Ιατρός/Κλινική:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Ημερομηνία εγκατάστασης:

Μεταπωλητής/Υποκατάστημα:

Υπεύθυνος εγκατάστασης:

Οδοντιατρείο:

Σημειώσεις:

Ελέγχθηκε με τον ιατρό/πελάτη:

Υπογραφή

Ημερομηνία

Ο ιατρός/πελάτης δεν είναι διαθέσιμος για έλεγχο της λίστας ελέγχου

### Κεντρικά γραφεία της A-dec

2601 Crestview Drive

Newberg, OR 97132 ΗΠΑ

Τηλ: 1.800.547.1883 εντός ΗΠΑ/Καναδά

Τηλ: 1.503.538.7478 εκτός ΗΠΑ/Καναδά

Φαξ: 1.503.538.0276

www.a-dec.com / www.a-dec.biz

*H A-dec Inc. δεν εγγυάται με κανέναν τρόπο για το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των άρρητων εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.*