

# Onderhoudschecklist apparatuur\*

## Na elke patiënt

- Reinig, smeer en steriliseer handstukken
- Reinig (*ultrasoon*) en steriliseer spuittips
- Veeg en spoel handstukslangen af
- Spoel afzuigleidingen (*voor mondchirurgie*)
- Reinig/desinfecteer raak- en overdrachtoppervlakken
- Vervang al het afdek materiaal

## Dagelijks of naar behoefte

- Voeg A-dec ICX® toe aan elke nieuwe waterfles†
- Spoel spittoon gedurende een minuut
- Maak spittoon en spoelbakraster schoon
- Spoel afzuigleidingen

## Wekelijks of indien nodig

Datum/tijd

- Reinig bekleding van behandelstoel en werkstoeltje met mild afwasmiddel en water
- Reinig kleppen van chirurgische afzuiging en speekselafzuiger
- Inspecteer en vervang afvalcollector (*tweemaal per week*)
- Controleer oliecollector (*maandelijks als een Assistina wordt gebruikt voor onderhoud van handstukken*)
- Smeer boorkoppen van handstukken
- Reinig scherm van behandellamp met mild afwasmiddel en water  
(*gebruik een gaasje of zachte doek van 5x5 cm om krassen op het scherm te voorkomen*)
- Vervang, indien van toepassing, afdek materiaal Medicom® SafeShield™ op behandellamp

## Maandelijks

Datum/tijd

- Test KVE-gehalte in water van behandelunit en behandel waterleidingen indien nodig†
- Controleer oliecollector (*wekelijks als geen Assistina wordt gebruikt voor onderhoud van handstukken*)
- Inspecteer alle O-ringen van handstuk, motor en Assistina; vervang indien versleten/beschadigd
- Smeer O-ringen van chirurgische afzuiging en speekselafzuiger
- Smeer O-ringen van waterfles

## Jaarlijks

Datum/tijd

- Vervang en smeer O-ringen van spuiten en drukknopventielen
- Vervang en smeer O-ringen van chirurgische afzuiging en speekselafzuiger
- Vervang alle O-ringen van handstuk, motor en Assistina
- Vervang lucht- en waterfilters in de vloerdoos of aansluitdoos voor nutsvoorzieningen

