

A-dec 300、400 及 500 產品系列安裝核對清單

若需更詳細資料，請參閱牙科治療椅及可選模組的安裝指南。

型號	序號	型號	序號
治療椅：		手術燈：	
治療枱：		牙醫助理：	
供給中心：		其他：	

牙科治療椅

- 牙科治療椅已牢固鎖於地上
- 治療椅各項功能運作正常，包括由觸控板及腳踏開關所控制的治療椅升降、傾斜及可程式化的功能
- 頭枕運作正常

牙科治療台

- 牙科手機運作正常，並已按照醫生的偏好設定：
 - 冷卻水、冷卻氣體及噴霧
 - 牙科手機導管沖洗系統
 - 牙科手機托架閥及開關
 - 牙科手機驅動氣壓
- 如具備：彈簧輔助屈臂已適當平衡
- 屈臂氣體制動器運作正常
- 只限 336：已安裝旋轉止動銷，並可正常運作
- 只限 336：已設定手動高度調整臂的高度，並已設定旋轉張力
- 裝置控制端水平與托盤量度相同
- 關節臂不會偏移
- 腳踏控制板運作正常

牙科手術燈

- 所有手術燈的設定及控制均運作正常
- 牙科手術燈屈臂及控制端張力已適度調整
- 只限石英牙科手術燈：有備用燈泡 (A-dec p/n 041.709.00)

牙醫助理器械、痰盂及口杯注水器

- 真空/吸唾已按照以下規格設定：
 - 濕真空 - 34 ± 7 帕斯卡 (10 ± 2 英寸汞柱)，最低每分鐘 255 sl (9 標準立方分米每分鐘)
 - 乾/半乾真空 - 16 ± 3.5 帕斯卡 (4.5 ± 1 英寸汞柱)，最低每分鐘 340 sl (12 標準立方分米每分鐘)
- 氣體及水噴槍按鈕運作暢順
- 強力吸引器 (HVE) 及排涎器 (SE) 的閥可自由移動
- 口杯注水器時間已適當設定
- 痰盂流量模式能有效並正確地清洗痰盂及痰盂排水裝置
- 只限 361、362 及 363：痰盂通風管末端在供給中心桁架 13 毫米 (1/2 英寸) 之上
- 只限 361 及 363：痰盂及扶手之間應有 29 毫米 (1-1/8 英寸) 的空間

水電和氣體設施

- 規管氣壓為每平方英寸 80 磅
- 地箱不會受氣體泄漏和漏水影響
- 重力排水裝置運作正常
- 導管及連接沒有打結，而且不會受氣體泄漏和漏水影響
- 多餘導管及纜線已捲起，並存放在遠離移動零件的位置

醫生/診所：

地址：

電話：

安裝日期：

經銷商/分店：

安裝人：

牙科操作室：

備註：

已與醫生/客戶檢查：

簽署

日期

醫生/客戶無暇檢查核對清單

A-dec 總公司

2601 Crestview Drive

Newberg, OR 97132 美國

電話：1.800.547.1883 美國/加拿大境內

電話：1.503.538.7478 美國/加拿大境外

傳真：1.503.538.0276

www.a-dec.com / www.a-dec.biz

A-dec Inc. 公司對本文件的內容不作任何保證，
包括但並不局限於相關適銷性與特殊目的適用性的
隱含保證在內。

