

A-dec 200 牙科治療椅及模組安裝核對清單

若需更詳細資料，請參閱牙科治療椅及可選模組的安裝指南。

	型號	序號	型號	序號
治療椅：	200		手術燈：	
治療枱：			牙醫助理：	200
供給中心：	200		其他：	

牙科治療椅

- 牙科治療椅已牢固鎖於地上
- 治療椅各項功能運作正常，包括由觸控板及腳踏開關所控制的治療椅升降、傾斜及可程式化的功能
- 頭枕運作正常
- 扶手運作正常
- 止動板運作正常

牙科治療台

- 牙科手機運作正常，並已按照醫生的偏好設定：
 - 冷卻水、冷卻氣體及噴霧
 - 牙科手機導管沖洗系統
 - 牙科手機托架閥及開關
 - 牙科手機驅動氣壓
- 屈臂適當平衡
- 屈臂位置張力設定適當
- 屈臂旋轉止動銷已安裝
- 控制端水平與控制端頂部量度相同
- 關節臂不會偏移
- 腳踏控制板運作正常

牙科手術燈

- 所有手術燈的設定及控制均運作正常
- 屈臂及控制端張力已適度調整
- 屈臂旋轉止動銷已安裝

牙醫助理器械、痰盂及口杯注水器

- 真空/吸唾已按照以下規格設定：
 - 濕真空 - 34 ± 7 帕斯卡 (10 ± 2 英寸汞柱)，最低每分鐘 255 sl (9 標準立方分米每分鐘)
 - 乾/半乾真空 - 16 ± 3.5 帕斯卡 (4.5 ± 1 英寸汞柱)，最低每分鐘 340 sl (12 標準立方分米每分鐘)
- 氣體及水噴槍按鈕運作暢順
- 強力吸引器 (HVE) 及排涎器 (SE) 的閥可自由移動
- 口杯注水器時間已適當設定
- 痰盂流量模式能有效並正確地清洗痰盂及痰盂排水裝置

水電和氣體設施

- 規管氣壓為 522 帕斯卡 (每平方英寸 80 磅)
- 地箱不會受氣體泄漏和漏水影響
- 重力排水裝置運作正常
- 導管及連接沒有打結，而且不會受氣體泄漏和漏水影響
- 多餘導管及纜線已捲起，並存放在遠離移動零件的位置

醫生/診所：

地址：

電話：

安裝日期：

經銷商/分店：

安裝人：

牙科操作室：

備註：

已與醫生/客戶檢查：

_____ 簽署

_____ 日期

醫生/客戶無暇檢查核對清單

A-dec 總公司

2601 Crestview Drive

Newberg, OR 97132 美國

電話：1.800.547.1883 美國/加拿大境內

電話：1.503.538.7478 美國/加拿大境外

傳真：1.503.538.0276

www.a-dec.com

A-dec Inc. 公司對本文件的內容不作任何保證，
包括但並不局限於相關適銷性與特殊目的適用
性的隱含保證在內。

